



## Collirio ialuronico 0,3 %

con ialuronato di sodio 0,3 %

Prodotto medico

La preghiamo di leggere attentamente il presente foglietto illustrativo che contiene informazioni importanti, da osservare per l'uso di questo medicinale. Per informazioni si rivolga direttamente al medico o al farmacista.

### Descrizione

Il collirio ialuronico 0,3 % forma sulla cornea una pellicola protettiva sterile, senza conservanti, viscoelastica e trasparente. Il collirio ialuronico 0,3 % contiene ialuronato di sodio, il sale sodico dell'acido ialuronico, il che grazie alle sue particolari proprietà fisiche, forma una pellicola protettiva uniforme, stabile e particolarmente a lunga durata adesiva sulla cornea, senza compromettere la vista.

Grazie a ciò, il collirio ialuronico 0,3 % ha un'azione lenitiva a lungo termine soprattutto per sintomi legati a

- sollecitazione meccanica, per es. dovuta alle lenti a contatto dure oppure morbide, o a interventi diagnostici nell'occhio,
- stress ambientale, per es. dovuto ai condizionatori, vento, freddo, aria secca o inquinamento dell'aria dovuto al fumo delle sigarette

oppure

- occhi irritati, per es. per troppe ore davanti al monitor del computer, davanti al microscopio nonché per lunghe ore di guida.

Grazie alla sua totale assenza di conservanti, il collirio ialuronico 0,3 % è particolarmente ben tollerato anche nel caso di applicazioni prolungate. Il collirio ialuronico 0,3 % si adatta anche ai portatori di lenti a contatto. È necessario togliere le lenti a contatto prima di applicare il collirio.

### Uso

Per aprire il flacone, tirare l'anello di sicurezza tirandolo dalla linguetta, fino a rimuoverlo completamente (1). Dopodiché sollevare il cappuccio tirandolo verso l'alto (2).

Inclinare leggermente la testa all'indietro, rivolgete lo sguardo verso l'alto e sollevate leggermente la palpebra inferiore dall'occhio. Mantenete il flacone al contrario, con il beccuccio rivolto verso il basso e con una pressione decisa e lunga sul flaconcino, inserite 3-5 gocce al giorno nel sacco congiuntivale dell'occhio (3 + 4). Chiudete lentamente gli occhi, per far distribuire il liquido uniformemente sulla superficie dell'occhio.

Evitate qualunque contatto del beccuccio del flacone con l'occhio o le mani. Se ci sono ancora gocce sul cappuccio, potete rimuoverle battendo leggermente sul fondo del flacone. Ora potete richiudere il flacone riapplicando il cappuccio con una leggera pressione (5).

In caso di peggioramento dei sintomi o di mancato miglioramento, rivolgetevi ad un medico.



Grazie allo specifico sistema filtro dell'aria sterile di cui è dotato il flaconcino, è possibile lasciar trascorrere alcuni secondi di tempo di attesa dopo ogni applicazione, senza dover esercitare alcuna pressione sul flaconcino, per permettere all'aria di affluire nuovamente. Senza questo tempo di attesa, l'applicazione è semplicemente più difficile. Inoltre, da un punto di vista fisico, ciò richiede una pressione leggermente maggiore mentre continua a svuotarsi il flaconcino.

**Composizione:** 1 ml contiene: ialuronato di sodio 0,3 %, cloruro di sodio, citrato di sodio, acido citrico, acqua a scopo di iniezione.

**Grandezza della confezione:** unità di vendita: 1 x 10 ml



## Avvertenze e misure precauzionali

- Non utilizzare nel caso di flaconcino o anello di sigillatura danneggiati.
- Non toccare l'occhio con il beccuccio del flaconcino.
- Non applicare in caso di nota ipersensibilità a uno degli ingredienti.
- Nel caso utilizzate altri colliri/unguenti oftalmici, è opportuno osservare un intervallo di applicazione di 15 minuti. In quel caso sarebbe opportuno utilizzare sempre per ultimo il collirio ialuronico 0,3 %.
- Non applicare su occhi infetti o con ferite.
- Dopo l'applicazione potrebbe verificarsi una momentanea riduzione dell'acutezza visiva; in tal caso, non guidare veicoli, non comandare e mantenere macchine, fino a che non sia ripristinata la corretta acutezza visiva.
- Non utilizzare il collirio dopo la data di scadenza. Questa è riportata sull'etichetta e sulla scatola.
- Dopo la prima apertura del flaconcino, non utilizzare il preparato oltre 12 mesi.
- Per via dello specifico e innovativo sistema filtro sterile del contagocce, resta sempre una piccola quantità di prodotto nel flaconcino.

## Conservazione

conservare tra 2 °C e 25 °C. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso, richiudere il flaconcino con il cappuccio. Conservare il flacone nella sua confezione originale al riparo dalla luce.

**Stato dell'informazione:** aprile 2018

PB0521

N. art.: 267

Per informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali leggere il foglietto illustrativo e consultare il proprio medico o il proprio farmacista.